








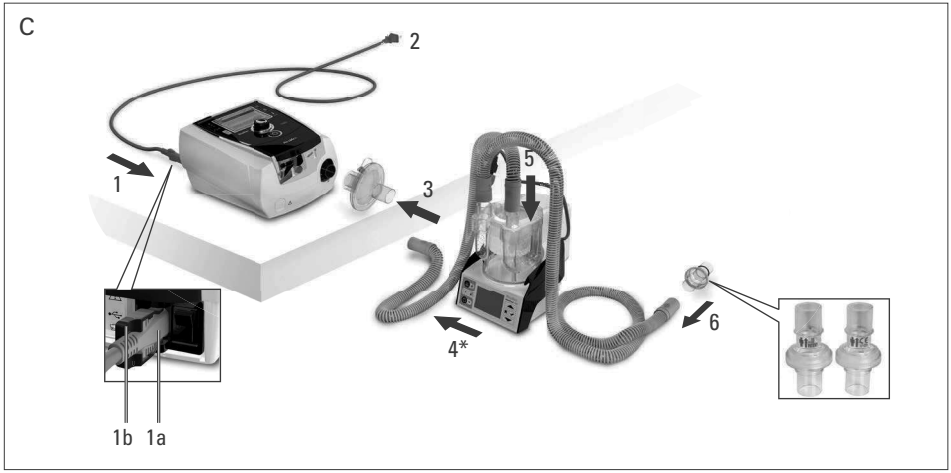


**Stellar™ series**  
Respiratory nieinwazyjne/inwazyjne

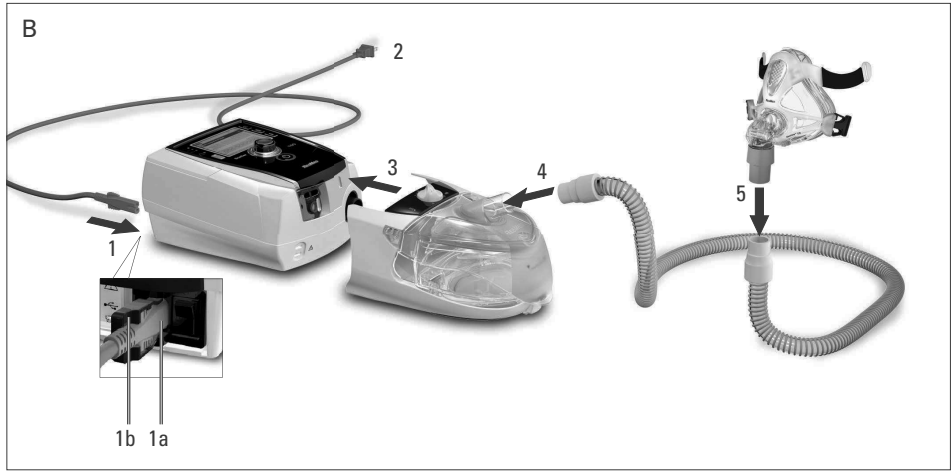

User Guide  
Polski

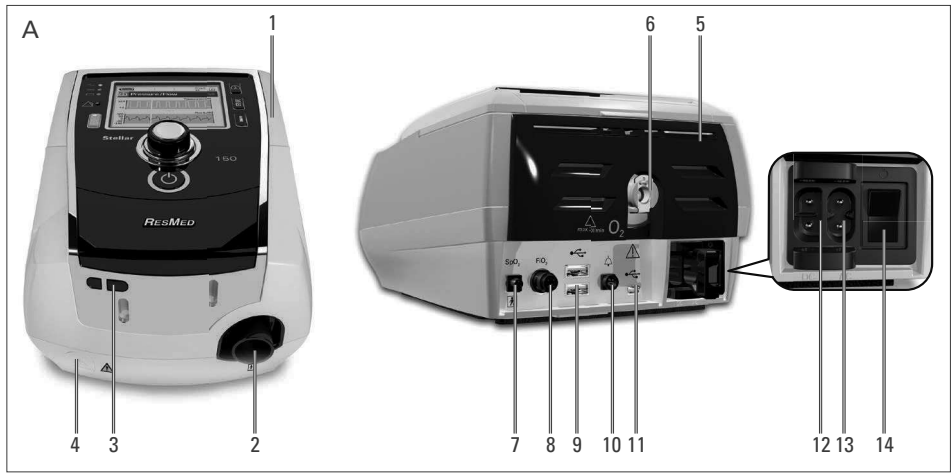

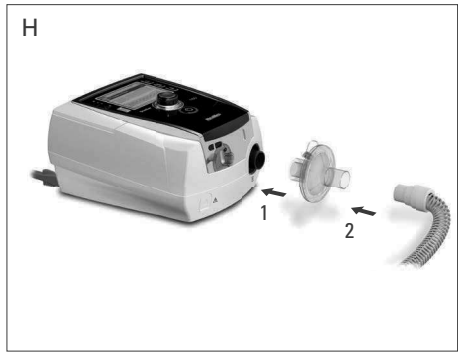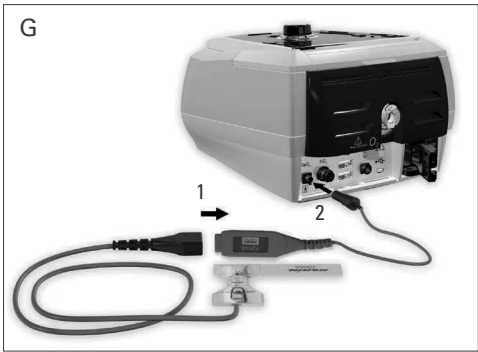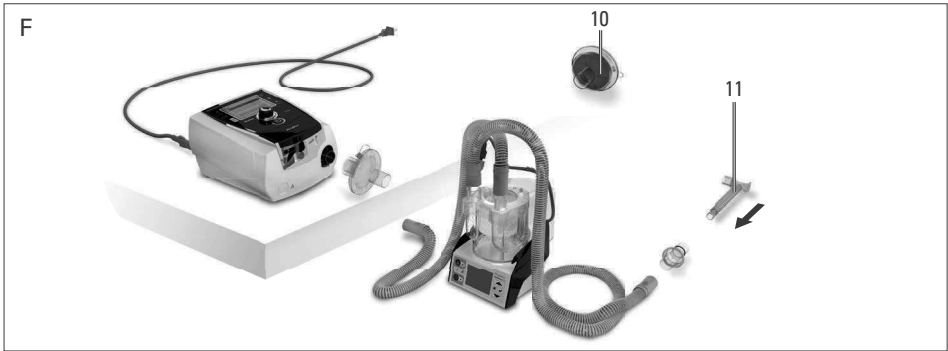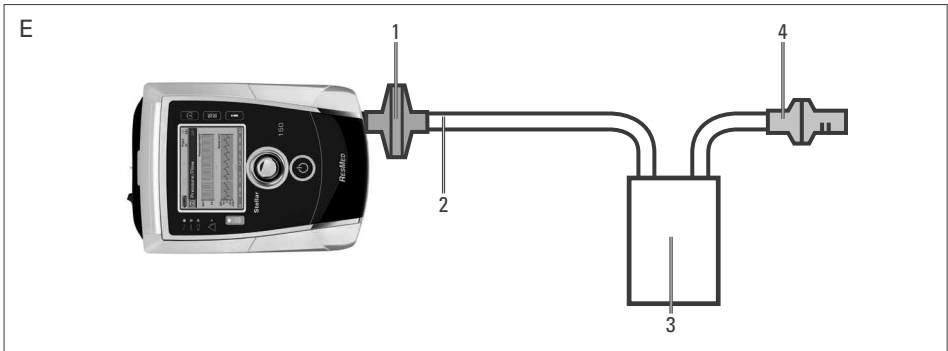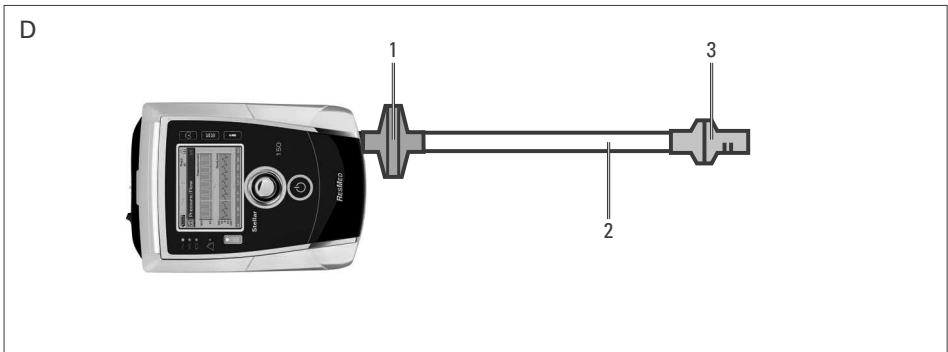






## Stellar w skrócie

### Panel sterowania

Patrz ilustracja L.

1. Dioda LED zasilania sieciowego—świeci się gdy urządzenie jest zasilane z sieci.
2. Ekran LCD
3. Menu monitorowania
4. Menu konfiguracji
5. Menu informacyjne
6. Pokrętko przyciskowe (obracanie/klikanie)
7. Dioda LED terapii—świeci się podczas prowadzenia leczenia. Miga podczas czynności dopasowywania maski
8. Przycisk Start/stop
9. Dioda LED wyciszenia alarmu—świeci się po naciśnięciu . Ma kolor czerwony lub żółty podczas alarmu lub testowania alarmu.
10. Dioda LED alarmu—przybiera kolor czerwony lub żółty podczas alarmu lub podczas testowania alarmów.
11. Bateria wewnętrzna—włączona gdy jest w użyciu bateria wewnętrzna. Miga podczas ładowania baterii gdy urządzenie jest wyłączone.
12. Zasilanie zewnętrzne—włączona gdy jest podłączona bateria zewnętrzna.



Klawisz	Funkcja
<b>Start/Stop</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozpoczyna lub przerywa terapię.</li> <li>• Przytrzymanie tego przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje uruchomienie funkcji dopasowania maski.</li> </ul>
<b>Wyciszenie alarmu</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podczas terapii: Nacisnąć jeden raz aby wyciszyć alarm. Drugie naciśnięcie powoduje ponowne włączenie alarmu. Jeśli problem nie został zlikwidowany, dźwięk alarmu rozlegnie się ponownie po upływie dwóch minut. Patrz „Praca z alarmami” na stronie 11.</li> <li>• W trybie gotowości: przytrzymanie tego przycisku przez co najmniej trzy sekundy powoduje uruchomienie testu diody LED alarmu i sygnału alarmowego.</li> </ul>
<b>Przyciski menu</b> 	<p>W celu przywołania i przewijania wybranego menu należy nacisnąć przycisk odpowiedniego menu (Monitorowanie, Konfiguracja, Informacje).</p>
<b>Pokrętko przyciskowe</b> 	<p>Obracanie pokrętkiem umożliwia pacjentowi przewijanie przez elementy menu i zmianę ustawień. Naciśnięcie pokrętki pozwala na wejście do menu lub potwierdzenie wybranych ustawień.</p>

### Ekran LCD

Na ekranie LCD wyświetlane są menu, ekrany monitorowania i alarmy.

Wartości na ekranie LCD i innych ekranach w niniejszym Podręczniku klinicznym są tylko przykładowe.

Patrz ilustracja M.

1. Poziom naładowania baterii wewnętrznej
2. Zasilacz zewnętrzny
3. Zasilanie z sieci elektrycznej
4. Pamięć USB ResMed
5. Funkcja podgrzewania nawilżacza H4i
6. Czas narastania
7. Program
8. Tryb terapii
9. Tryb pacjenta  lub tryb kliniczny 
10. Bieżący ekran/liczba ekranów w menu
11. Pasek przewijania
12. Pasek statusu terapii
13. Ustawienia
14. Pasek tytułu